

JEDNORAZOWE LANCETY PERSONALNE

Sterylnie, jednorazowe urządzenia
medyczne przeznaczone do pobierania
próbek krwi kapilarnej, wspierające osoby
z cukrzycą w codziennym monitorowaniu
poziomu glukozy we krwi



Przeznaczenie produktu

Lancety **droplet®** to sterylne wyroby medyczne jednorazowego użytku, przeznaczone do stosowania z urządzeniem nakłuwającym przez użytkowników nieprofesjonalnych w celu pobierania próbek krwi kapilarnej.

Cechy produktu

Kompatybilne

Mogą być stosowane z większością popularnych urządzeń nakłuwających.¹

Rekomendowane dla pacjentów z różnymi typami skóry.²

Bezpieczne

Igły wyposażone w ochronną osłonkę zabezpieczającą.

Sterylnizowane metodą promieniowania.

Komfortowe

Igła pokryta warstwą silikonową i poddana elektropolerowaniu, zaprojektowana z myślą o redukcji bólu.³

Końcówka igły ostrzona trójkątnie dla większego komfortu użytkownika.³

Łatwe w obsłudze

Ergonomiczna konstrukcja, łatwa w obsłudze.



Lancety personalne **droplet®** zalecane są do stosowania z urządzeniem nakłuwającym **droplet®**. Urządzenie nakłuwające **droplet®** jest wyrobem medycznym wielokrotnego użytku wykorzystującym sterylne, jednorazowe lancety, przeznaczonym do pobierania próbek krwi włóśniczkowej przez użytkowników nieprofesjonalnych.

5 poziomów głębokości nakłucia skóry dla zapewnienia komfortu użytkownikom.¹


Specjalnie zaprojektowany system do bezpiecznego usuwania zużytych lancetów.⁴



Dodatkowa przezroczysta nakładka AST do pobierania próbki krwi z innych miejsc.⁴



Widoczna różnica między załadowanym (a) a niezaladowanym (b) urządzeniem nakłuwającym.⁴

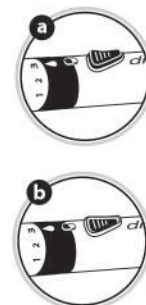

Fakty i wskazówki dotyczące monitorowania poziomu glukozy we krwi

Nakłuwanie palca jest integralnym elementem samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi i codziennego życia milionów osób chorych na cukrzycę. Badanie poziomu glukozy we krwi ułatwia osobom chorym na cukrzycę podejmowanie właściwych decyzji dotyczących diety, aktywności i przyjmowania leków.⁵

- Należy pamiętać, żeby za każdym razem użyć nowego lancetu! Lancety są przeznaczone do jednorazowego użycia; po użyciu należy je zutylizować w bezpieczny sposób.
- Ponowne użycie lancetów powoduje uszkodzenie końcówki, co może powodować zwiększone odczuwanie bólu, krwawienie, siniaki lub blizny.⁶
- Należy starać się używać różnych palców za każdym razem i nigdy nie używać palca, który jest już obolały. Jednym ze sposobów na zmniejszenie ryzyka odczuwania bólu podczas nakłuwania palca jest pobieranie krwi przez nakłucie bocznej powierzchni palca, a nie jego opuszki lub czubka. Technika ta jest skuteczna, ponieważ na bocznej powierzchni palca występuje mniej zakończeń nerwowych niż na czubku czy opuszce palca.⁷

Wiele osób chorych na cukrzycę daje odpocząć swoim palcom i pobiera próbki krwi w innych miejscach (ang. Alternate Site Testing, AST). Pobieranie próbek krwi do oznaczenia poziomu glukozy w innych miejscach (AST) oznacza nakłuwanie miejsc innych niż palce. Może to obejmować pobranie próbki krwi z dłoni, górnej części przedramienia, brzucha, łydki i uda. Palce są tradycyjnie używane do badania poziomu glukozy we krwi, ponieważ mają wiele naczyń włosowatych i zwykle zapewniają wystarczająco dużą kroplę krwi, aby uzyskać odczyt z glukometru.⁸

Jak używać lancetów personalnych droplet®?

Jest to urządzenie medyczne. Proszę używać go zgodnie z instrukcją obsługi i etykietą.


1

Odkręć regulator głębokości.




2

Włóż nowy, sterylny lancet do urządzenia nakłuwającego.

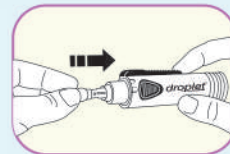


3

Ukręć i zdejmij osłonkę ochronną z lancetu.

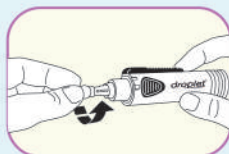

4

Wykonaj nakłucie zgodnie z zaleceniami personelu medycznego.

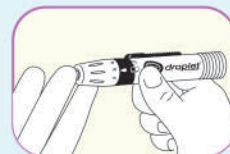


5

Po użyciu, odkręć regulator głębokości.



6

Wysuń lancet z urządzenia nakłuwającego. Bezpiecznie wyrzuć zużyty lancet, zgodnie z lokalnymi przepisami.

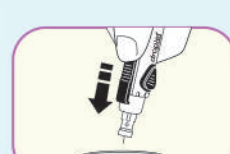

Lancety dostępne w dwóch wersjach:

	nazwa produktu	rozmiar lancetu
	lancety personalne droplet®	30G
	lancety personalne droplet®	28G

Kompatybilne z urządzeniem nakłuwającym droplet®:



Urządzenie nakłuwające droplet®

ŹRÓDŁA:

1. HTL-STREFA S.A. Dane w aktach. Lista urządzeń nakłuwających współpracujących z lancetami personalnymi droplet® typ 560 produkowanymi przez HTL-Strefa S.A. Na podstawie wewnętrznego badania HTL-STREFA S.A.: KJ-S AJ 079 13 560.
2. Żurawska G. Single-blind, Randomized, Singlecentre Study to Investigate the Characteristics of Different Personal Lancets on Blood Volume and Perceived Pain in Patients with Diabetes Mellitus. Diabetes Manag. (2016) 6(3). 066—070.
3. Kocher S, et al. Comparison of lancing devices for self-monitoring of blood glucose regarding lancing pain. J Diabetes Sci Technol. 2009 Sep 1;3(5):1136-43.
4. HTL-STREFA S.A. Dane w aktach. Specyfikacja produktu – urządzenie nakłuwające typu 710.
5. Heinemann L, Boecker D. Lancing: QuoVadis? J Diabetes Sci Technol. 2011 Jul; 5(4): 966-981.
6. WHO guidelines on drawing blood: best practices in phlebotomy. Dokument dostępny na stronie: http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0005/268790/WHO-guidelines-on-drawing-blood-best-practices-in-phlebotomy-Eng.pdf?ua=1.
7. Heinemann L. Finger Pricking and Pain: A Never Ending Story. J Diabetes Sci Technol. 2008 Sep; 2(5): 919-921.
8. POBIERANIE PRÓBEK KRWI W INNYCH MIEJSCACH (AST) Globalna społeczność diabetyków. Dokument dostępny na stronie: <https://www.diabetes.co.uk/blood-glucose/alternate-site-testing.html>.



HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
info@htl-strefa.pl
www.htl-strefa.com

www.mtdglobal.com

HTL STREFA
high tech lab
spółka należąca do Grupy MTD

MTD
Medical Technology and Devices

560/ALL/04/2025
Wyprodukowano w Polsce